




Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Enuresis

Mat Enwresis

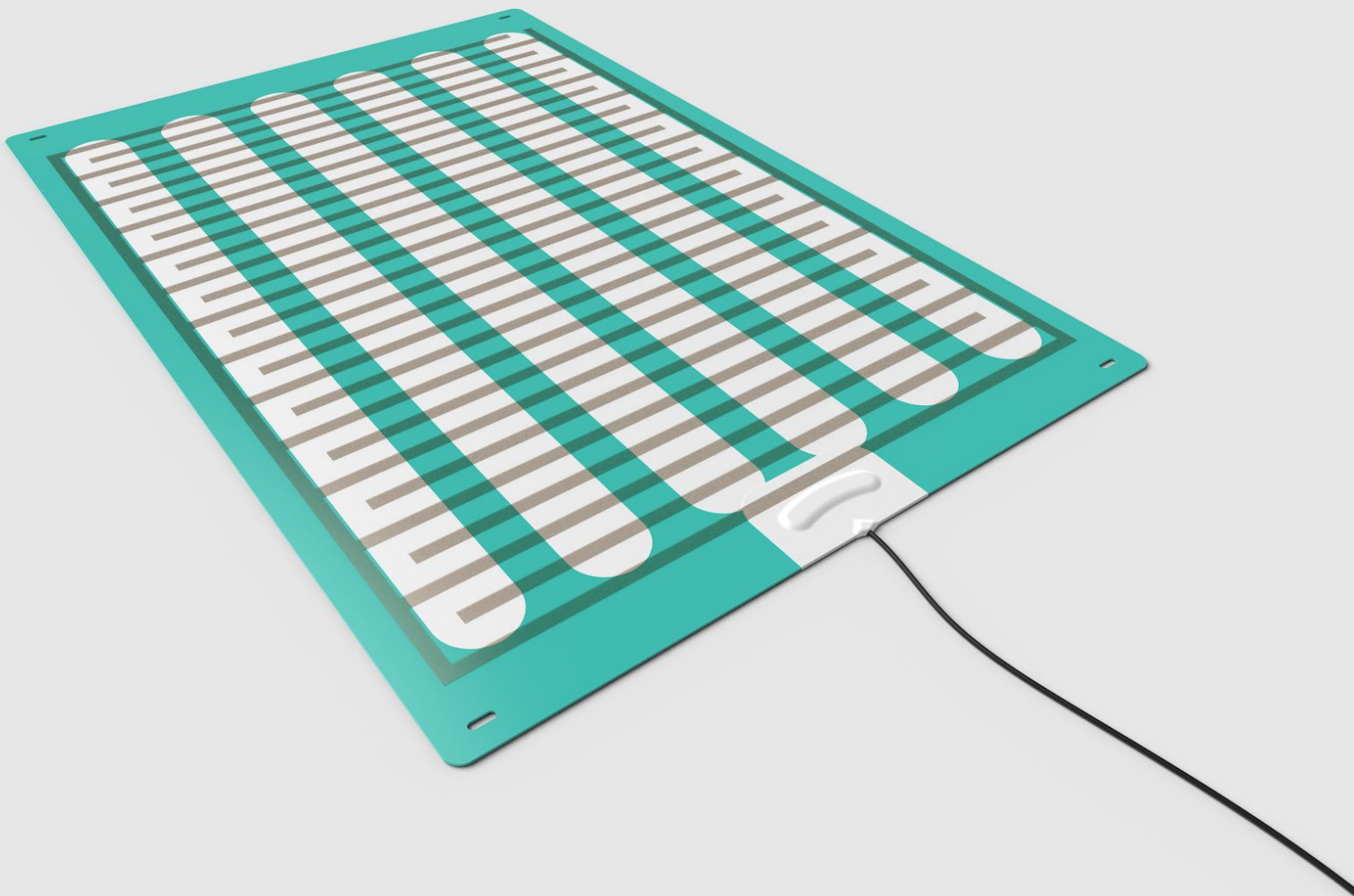

Wedi'i osod ar wely, rhwng y fatres a'r cynfas, mae'r mat hwn yn rhoi rhybudd ar unwaith ar ganfod gwlychiad, gan ganiatáu i gamau effeithiol gael eu cymryd. Mae'r mat yn lleihau'r angen i berson cael eu hafloynyddu ag yn hyrwyddo urddas ac annibyniaeth yn lle

Gellir ail-ddefnyddio'r matiau gwydn, hawdd ei glanhau er mwyn weithred gost-effeithiol a hylan.

Manylebau

Cydnawsedd	Cair Detect, a'r mwyafrif o ddyfeisiau 3ydd parti
Maint	H760 x LI510
Hyd y cebl	1900mm
Math o blwg	RJ12
Gwarant	12 mis

Gwybodaeth

Gellir defnyddio'r mat enwresis gyda'r Cair Detect a'r mwyafrif o ddyfeisiau 3ydd parti i rybuddio pan ganfyddir gwlychiad. Dylid ei osod yn wastad ar ben y fatres gyda'r ochr werdd a gwyn yn wynebu i fyny, uwchben unrhyw gynfas diddos, a'i gosod o amgylch ardal y glun. Os yw'r synhwyrdd yn rhy sensitif, rhowch gynfas arall ar ben y mat. Sicrhewch fod y cebl yn cael ei osod yn ddiogel i osgoi risg baglu.

I sicrhau fod y mat yn gweithio, rhowch liain llaith ar yr ochr werdd a gwyn am ychydig o eiliadau nes bod y ddyfais gysylltiedig yn rhybuddio. Mae rhaid gwneud hyn o bryd i bryd i sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn.

Dylai'r mat gael ei lanhau'n rheolaidd. I lanhau, defnyddiwch gadach gyda thoddiant gwrthfacterol neu 'antibacterial wipes', cymerwch ofal i osgoi niweidio'r ardal lle mae'r cebl yn mynd i mewn i'r mat. Gadewch iddo sychu'n naturiol neu sychu gyda thywel glân, sych. Peidiwch â throchi'r mat mewn unrhyw doddiant.

Pan fydd y mat yn cael ei storio, cadwch yn fflat neu rholiwch y mat yn rhydd. Peidiwch â phlygu'r mat.

