

Manylebau

| | |
|-------------|---|
| Cydnawsedd | Cair Detect, a'r mwyafrif o ddyfeisiau 3ydd parti |
| Maint | H375 x L1250 |
| Hyd y cebl | 1500mm |
| Math o blwg | RJ12 |
| Gwarant | 12 mis |

Gwybodaeth

Gellir defnyddio'r Cair Sit gyda'r Cair Detect a'r mwyafrif o ddyfeisiau 3ydd parti. Dylid ei osod uwchben neu o dan glustog y gadair. Sicrhewch fod y cebl wedi'i chuddio'n ddiogel o dan neu y tu ôl i'r glustog i osgoi risg baglu.

I sicrhau fod y synhwyrdd yn gweithio, dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer y ddyfais gysylltiedig. Mae rhaid gwneud hyn o bryd i bryd i sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn.

Dylai'r mat gael ei lanhau'n rheolaidd. I lanhau, defnyddiwch gadach gyda thoddiant gwrthfacterol neu 'antibacterial wipes', cymerwch ofal i osgoi niweidio'r ardal lle mae'r cebl yn mynd i mewn i'r pad. Gadewch iddo sychu'n naturiol neu sychu gyda thywel glân, sych. Peidiwch â throchi'r mat mewn unrhyw doddiant.

Dylid newid y pad ar ôl blwyddyn o ddefnydd. Pan fydd yn cael ei storio, cadwch y pad yn fflat. Peidiwch â phlygu'r pad.

