



Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Sleep

Pad Deiliadaeth Gwely



Mae'r Cair Sleep yn pad deiliadaeth gwely. Pan gaiff ei ddefnyddio ar y cyd â synhwyrdd deiliadaeth fel y Cair Detect, gall rybuddio ar unwaith pan fydd defnyddiwr yn gadael y gwely, neu ar ôl cyfnod o amser os na fydd yn dychwelyd i'r gwely.

Gellir gosod y pad, sydd wedi ei wneud efo finyl meddal i sicrhau cysur i'r defnyddiwr, uwchben y fatres.

Manylebau

Cydnawsedd	Cair Detect, a'r mwyafrif o ddyfeisiau 3ydd parti
Maint	H750 x LI250
Hyd y cebl	2300mm
Math o blwg	RJ12
Gwarant	12 mis

Gwybodaeth

Gellir defnyddio'r Cair Sleep gyda'r Cair Detect a'r mwyafrif o ddyfeisiau 3ydd parti. Dylid ei osod uwchben y fatres ac o dan y gynfas, a'i osod o amgylch ardal y glun. Sicrhewch fod y cebl wedi'i chuddio'n ddiogel i osgoi risg baglu.

I sicrhau fod y synhwyrdd yn gweithio, dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer y ddyfais gysylltiedig. Mae rhaid gwneud hyn o bryd i bryd i sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn.

Dylai'r mat gael ei lanhau'n rheolaidd. I lanhau, defnyddiwch gadach gyda thoddiant gwrthfacterol neu 'antibacterial wipes', cymerwch ofal i osgoi niweidio'r ardal lle mae'r cebl yn mynd i mewn i'r pad. Gadewch iddo sychu'n naturiol neu sychu gyda thywel glân, sych. Peidiwch â throchi'r mat mewn unrhyw doddiant.

Dylid newid y pad ar ôl blwyddyn o ddefnydd. Pan fydd yn cael ei storio, cadwch y pad yn fflat. Peidiwch â phlygu'r pad.

