



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu



Canllaw Cyfeirio Cyflym CairFall

we-cair.com

Cynnwys

- Tudalen 3 - Gweithrediad
- Tudalen 4 - Opsiynau Gwisgo
- Tudalen 5 - Troi Ymlaen a Modd Trafnidiaeth
- Tudalen 6 - Lefelau Sensitifrwydd, Canslo ac Opsiynau Protocol
- Tudalen 7 - Rhaglennu
- Tudalen 8 - Opsiynau Rhaglennu
- Tudalen 9 - Cysylltu'r CairFall i'r Notifier neu System Dderbyn Arall



CairFall

Gweithrediad

Mae'r CairFall, yn synhwyrdd cwmpo clyfar, amlbwrpas sydd yn hawdd eu ffurfweddu gellir eu gwisgo ar yr arddwrn neu o gwmpas y gwddf.

Mae'r CairFall clyfar yn galluogi unigolion i symud o gwmpas eu cartrefi yn hyderus, tra gwybod bydd rhybudd yn cael eu codi os maent yn dioddef o godwm caled. Mae o hefyd yn galluogi'r person i bwyso botwm i alw am gymorth. Mae yna pum gosodiad sensitifrwydd i siwtio pob lefel o weithgaredd person. Mae'r CairFall hefyd efo nodwedd cyfnod canslo ellir eu hanalluogi os bydd angen.

Pwysig: I leihau'r risg o larymau ffug, mae'r CairFall wedi'i ddylunio i ddarganfod codymau trwm yn unig, er na fydd pob codwm o'r math yma yn cael eu darganfod. Am y rheswm hwn, mi ddylai defnyddwyr sydd angen cymorth hefyd pwysu'r botwm ar y CairFall os yn bosib.



CairFall

Opsiynau Gwigsgo

Mi ellir gwisgo'r CairFall mewn dwy ffordd - ar yr arddwrn neu o gwmpas y gwddf. Gallwch hefyd ddod o hyd i ganllawiau fideo yma: <https://www.youtube.com/@cairuk5265>.

Os yw'n well gennych wisgo ar llyn gwddf, tynnwch y pinnau sy'n dal y strap arddwrn yn eu lle. Dylai'r atodiad gwddf fynd uwchben y golau LED ar y CairFall. I ddechrau, rhwch y pin trwy'r tyllau yn yr atodiad, yna gwrthio'r pin i'r tyllau ar ben y CairFall, yna ailadroddwch y broses ar gyfer yr atodiad isaf. Nesaf, rhwch ben tenau'r llyn trwy'r twll yn yr atodiad gwddf a thynnwch ben arall y llyn trwy'r ddolen a thynhau.

Os yw'n well gennych wisgo'r strap arddwrn, tynnwch yr atodiadau gwddf, ynghyd â'r pinnau. Rhwch y strap arddwrn ar draws cefn y CairFall; gwnewch yn siŵr bod y strap yn wynebu'r ffordd iawn. Cymerwch bin a'i wasgu i lawr i'r twll gwaelod ar un pen o'r CairFall, yna gwrthio'r pin i lawr ac yn ôl nes ei fod yn clicio i mewn i'r twll uchaf. Yn olaf, ailadroddwch y broses ar yr ochr arall cyn gosod y strap arddwrn.



CairFall

Troi Ymlaen a Modd Trafnidiaeth

Troi'r CairFall Ymlaen

- I roi'r CairFall ymlaen, pwyswch y botwm 5 gwaith yn sydyn. Mi fydd LED glas yn fflachio bob tro mae'r botwm yn cael eu pwyso.
- Ar ôl yr 5ed gwasg, mi fydd LED ambr yn fflachio nifer o weithiau a fydd yn nodi'r lefel sensitifrwydd sydd wedi'i rhaglennu, ac wedyn fydd yr CairFall wedi switsio ymlaen.

Mynd i Mewn i Fodd Trafnidiaeth

- I fynd i mewn i fodd trafndiaeth, pwyswch y botwm 5 gwaith yn sydyn, ag dal y botwm lawr ar y 5ed gwasg.
- Tra bydd y botwm wedi eu dal i lawr, mi fydd y LED wyrdd yn fflachio ac mi fydd neges radio yn cael eu gyrru, wedi eu dilyn gan y LED glas yn fflachio yn sydyn i gadarnhau fod y CairFall nawr yn fodd trafndiaeth. Os nad yw'r LED glas yn fflachio yn sydyn, ailadroddwch y broses os gwelwch yn dda.



CairFall

Lefelau Sensitifrwydd, Canslo ac Opsiynau Protocol

Lefelau Sensitifrwydd Mae'r CairFall efo 5 lefel sensitifrwydd. Lefel 1 yw'r lleiaf sensitif a lefel 4 yw'r mwyaf sensitif. Y gosodiad diofyn yw lefel 3.

Opsiwn Canslo Mae yna gofnod canslo dewisol. Pan fydd y CairFall yn tybio fod codwm wedi digwydd, mi fydd rhybudd yn cael eu gyrru ar ôl 4 eiliad os mae'r cofnod canslo wedi troi i ffwrdd, neu ar ôl 24 eiliad os mae o ymlaen. Pan fydd yr opsiwn canslo ymlaen, mae'n bosib canslo rhybudd codwm o fewn 24 eiliad, drwy bwysu'r botwm 3 gwaith yn sydyn. Mi fydd y LEDs ambr yn stopio fflachio ar ôl y 3ydd gwasg.

Opsiynau Protocol Mae'r CairFall yn ddyfais rhyngweithredol gyda thri phrotocol radio adeiledig: Tunstall, TeleAlarm, Appello

Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i raglennu'r opsiynau Sensitifrwydd, Canslo a Phrotocol ar y dudalen nesaf...



CairFall

Rhaglennu

- Rhowch yn Fodd Trafnidiaeth
- I fynd i mewn i'r ddewislen rhaglennu, pwyswch y botwm 7 gwaith. Yn fuan ar ôl y 7fed gwasg, mi fydd y LED gwyrdd yn fflachio yn sydyn
- Mi fydd y LED ambr yn fflachio nifer o weithiau i nodi'r lefel sensitifrwydd sydd yn bodoli
- Mi fydd LED gwyn yn goleuo am 5 eiliad. Yn ystod yr amser yma, pwyswch ag rhyddhau'r botwm i gyd-fynd a'r lefel sensitifrwydd neu opsiwn yr ydych eisiau dewis h.y. Unwaith am Rif 1, dwywaith am Rif 2 a.y.b. (gweler yr opsiynau ar y dudalen nesaf)
- Mi fydd LED gwyn yn goleuo am 5 eiliad. Yn ystod yr amser yma, pwyswch ag rhyddhau'r botwm i gyd-fynd a'r lefel sensitifrwydd neu opsiwn yr ydych eisiau dewis h.y. Unwaith am Rif 1, dwywaith am Rif 2 a.y.b. Mi fydd y LED yn fflachio bob tro mae'r botwm yn cael eu pwyso. **Nodyn:** Os na fydd y botwm yn cael eu pwyso yn ystod yr adeg hon, mi fydd y LED coch yn fflachio yn sydyn ac mi fydd yr CairFall yn gadael y ddewislen rhaglennu
- Ar ôl y gwasg diwethaf, mi fydd y LED ambr yn fflachio i nodi'r rhif sydd wedi eu dewis.
- Mi fydd y LED coch wedyn yn fflachio yn sydyn ac mi fydd yr CairFall yn gadael y ddewislen rhaglennu.
- Ail-adroddwch gamau 2-6 os fydd mwy o raglennu eu hangen.
- Pan fydd wedi dar fod rhaglennu, rhowch yr CairFall ymlaen



CairFall

Opsiynau Rhaglennu

- Rhif.1. Lefel Sensitifrwydd 1 (Ileiaf sensitif)
- Rhif.2. Lefel Sensitifrwydd 2
- Rhif.3. Lefel Sensitifrwydd 3 (**gosodiad diofyn**)
- Rhif.4. Lefel Sensitifrwydd 4
- Rhif.5. Lefel Sensitifrwydd 1 (mwyaf sensitif)
- Rhif.6. Cyfnod Canslo i Fwrdd
- Rhif.7. Cyfnod Canslo Ymlaen (**gosodiad diofyn**)
- Rhif. 15. Protocol Tunstall
- Rhif. 20. Protocol TeleAlarm
- Rhif. 25. Protocol Appello



CairFall

Cysylltu'r CairFall i'r Notifier neu System Dderbyn Arall

- Sicrhewch fod yr CairFall ymlaen
- Paratowch y Notifier/system arall drwy fynd i mewn i fodd cofrestru
- Actifadu'r CairFall drwy bwysu'r botwm
- Dylai'r Notifier/system arall cydnabod y ddyfais newydd

Nodyn: Mae'r camau uchod yn ddigon i gofrestru'r botwm a'r rhybudd cwmpo i system gydnaws â Tunstall. Ar gyfer systemau TeleAlarm ac Appello, rhaid cofrestru'r ddwy ar wahân.



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Diolch



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

www.we-cair.com

01422 399155 | hello@we-cair.com