



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu




Canllaw Cyfeirio Cyflym Sit/Sleep Advanced

we-cair.com

[Cynnwys

- Tudalen 3 - Sut Mae'n Gweithio / Gosod
- Tudalen 4 - Troi Ymlaen/I Ffwrdd a Rhaglennu'r Moddau/Opsiynau
- Tudalen 5 - Moddau/Opsiynau ag Ailadrodd Rhybuddion
- Tudalen 6 - Oedi Absenoldeb
- Tudalen 7 - Aseinio i Notifier / System Arall

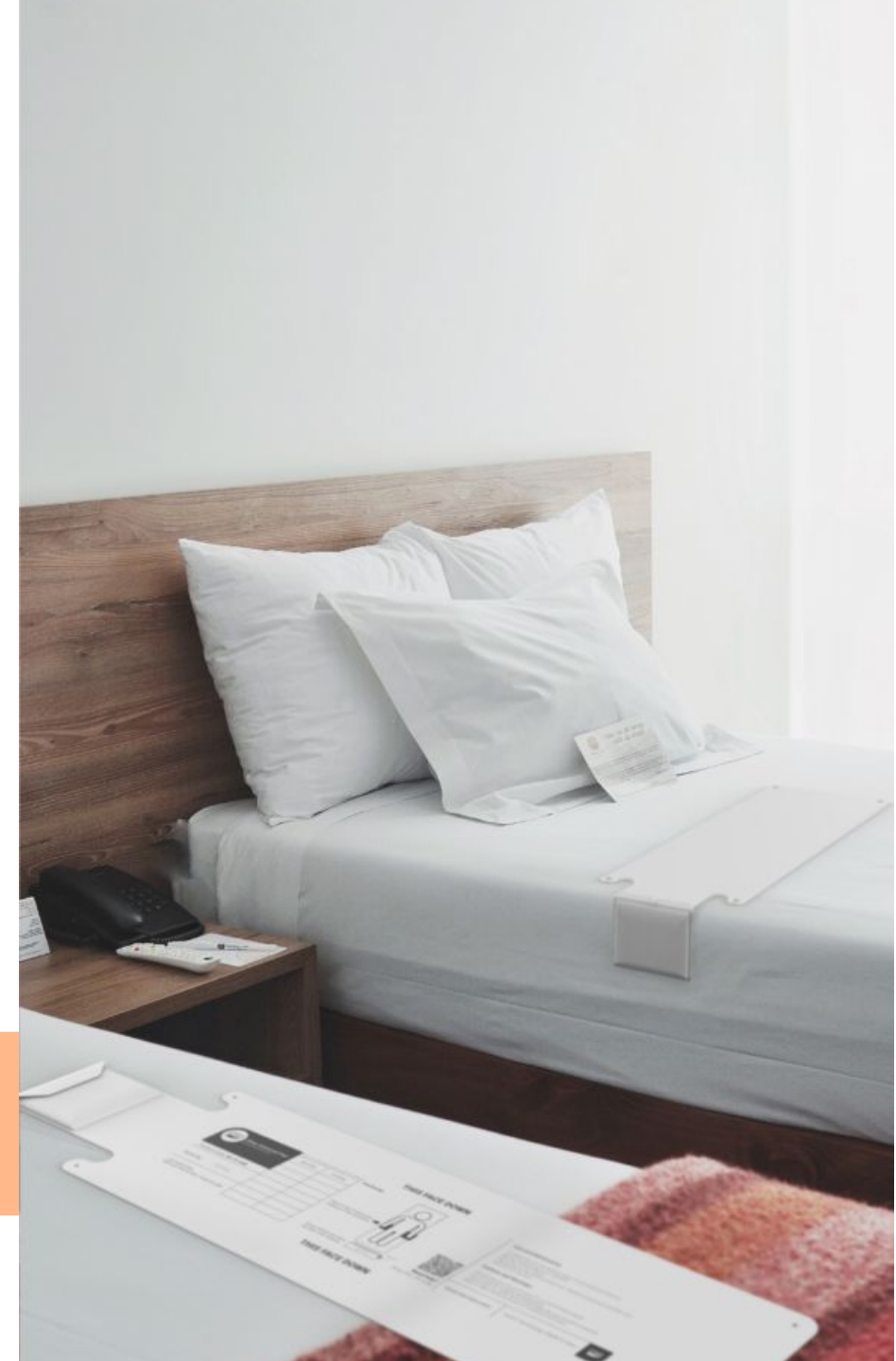

[Sit/Sleep Advanced


Sut Mae'n Gweithio / Gosod

Mae'r ddyfais yn cynnwys pad gwely neu gadair efo poced sydd efo uned fach tu fewn o'r enw Detect Mini

Mi ddylai lleoli'r synhwyrdd efo'r darn fflat o'r mat uwch ben y gwely neu gadair efo poced y Detect Mini wedi eu plygu lawr ochr y fatres neu glustog cadair.

i fydd y Detect Mini yn actifadu pan mae yna bwysau ar y gwely/pad am fwy na 3 eiliad. Mi fydd LED1 yn goleuo yn ystod yr amser hwn. Pan fydd pwysau yn cael eu codi o'r pad, mi fydd signal radio yn cael eu gyrru pan fydd yr oedi absenoldeb yn dod i ben.

Mae gan y Detect Mini swîts i ffwrdd/ymlaen, deial gyda 10 gosodiad a botwm rhaglennu. Mae'r ddau LED yn helpu efo rhaglennu a phrofi

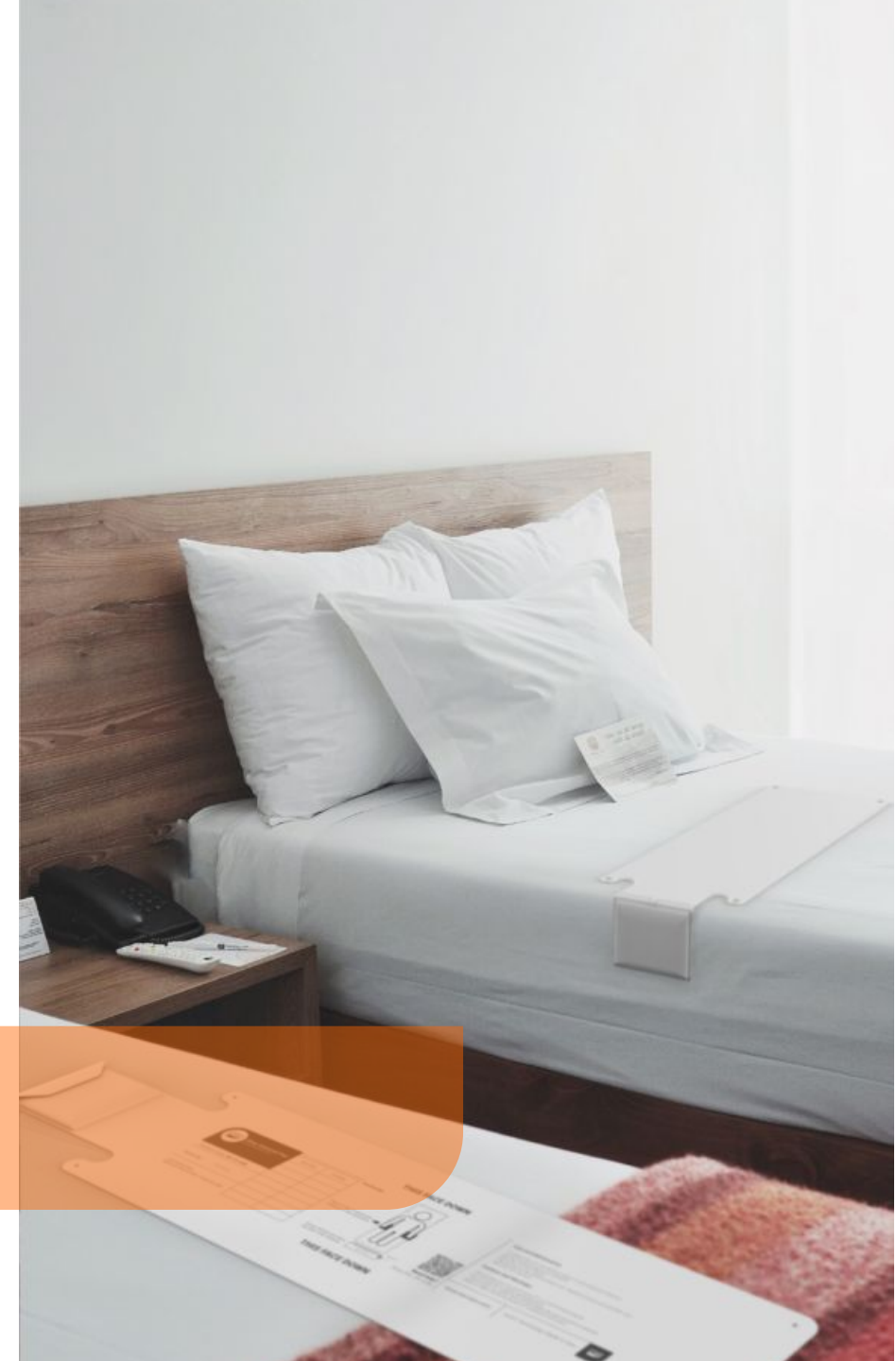

Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

[Sit/Sleep Advanced


Troi Ymlaen/I Ffwrdd a Rhaglennu'r Moddau/Opsiynau

Troi ymlaen: Llithro'r swîts ar ochr y Detect Mini tuag at 'On'

Troi i ffwrdd: Llithro'r swîts ar ochr y Detect Mini tuag at 'Off'

I raglennu'r moddau/opsiynau, defnyddiwch y dull canlynol:

- Trowch y deial i'r gosodiad a ddymunir
- Pwyswch y botwm am eiliad yn defnyddio offer addas. Mi fydd LED2 yn fflachio yn wyrdd pan fydd y botwm yn cael eu pwyso
- Pan fydd y botwm yn cael eu rhyddhau, mi fydd LED2 yn fflachio nifer o weithiau i gadarnhau'r rhif modd/opsiwn
- Gosodwch yr oedi absenoldeb fel y disgrifir ar y dudalen Oedi Absenoldeb

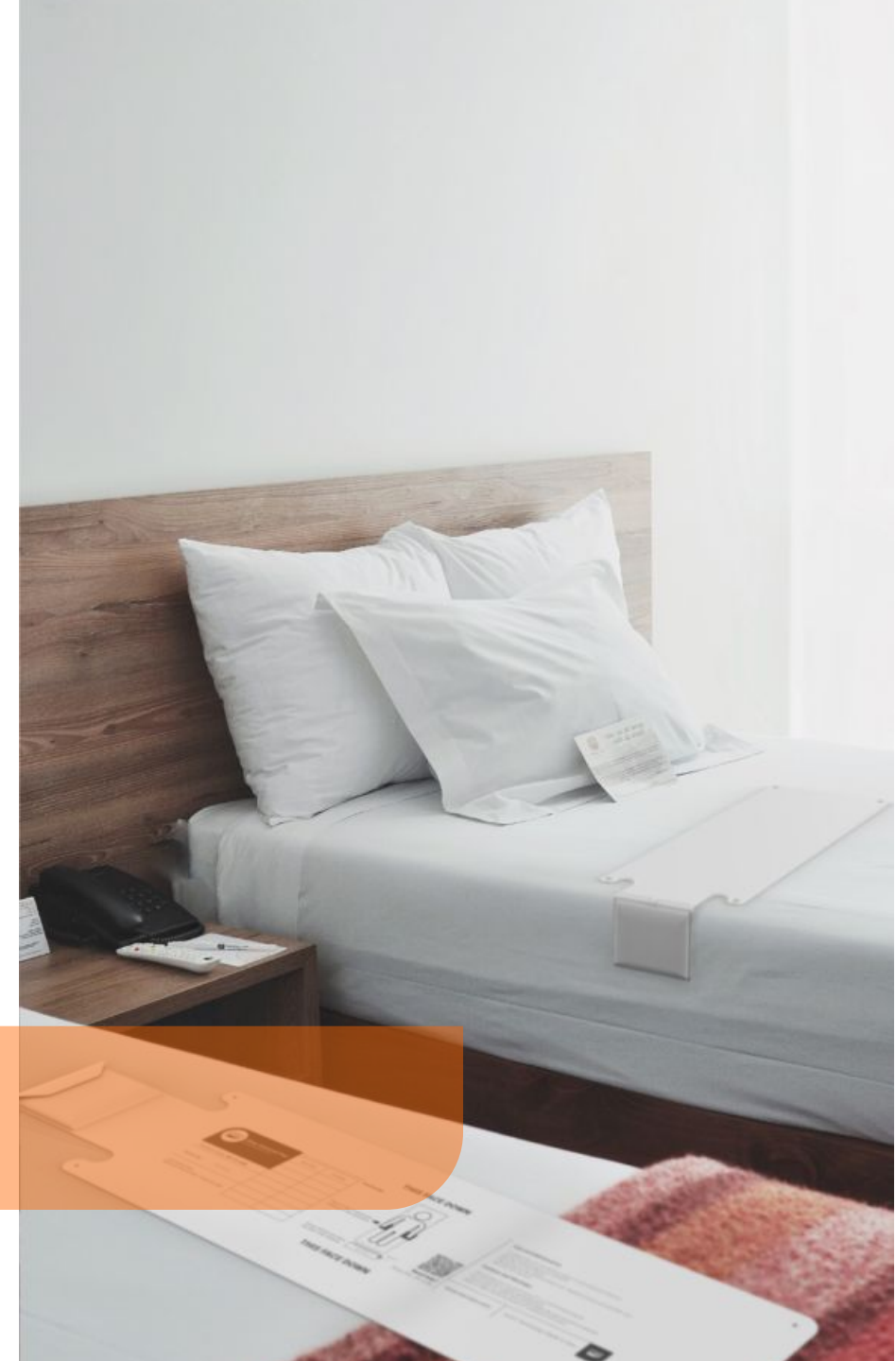

Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

[Sit/Sleep Advanced


Moddau/Opsiynau ag Ailadrodd Rhybuddion

- Modd 1. Absenoldeb Gwely/Cadair (**gosodiad rhagosodedig**)
- Modd 2. Gwely/Cadair 'Virtual'
- Modd 3. Modd Enwresis
- Modd 4. Modd Mat Pwysau
- Opsiwn 9. Gosodiad Ffatri

Ailadrodd Rhybuddion

Mi ellir y Detect Mini ailadrodd negeseuon radio pob 2 munud ar ôl i wely neu gadair cael eu gadael. Os mae rhywun yn mynd yn ôl i'r gwely/cadair mi fydd y rhybudd ailadrodd yn dod i ben. I raglennu'r rhybudd ailadrodd, troi'r deial i'r nifer o rybuddion ailadrodd sydd eu hangen a phwyswch a dal i lawr y botwm am 7 eiliad tan fydd LED2 yn goleuo'n goch. Mae gosodiad 0 yn troi'r ailadrodd i ffwrdd (**gosodiad rhagosodedig**)

- Dewis 0-9 ar y deial
- Pwyswch a dal i lawr y botwm am 7 eiliad tan fydd LED2 yn goleuo'n goch, wedyn rhyddhau'r botwm
- Mi fydd LED2 yn fflachio'n ambr i'r nifer o ailadroddon sydd wedi eu rhaglennu.

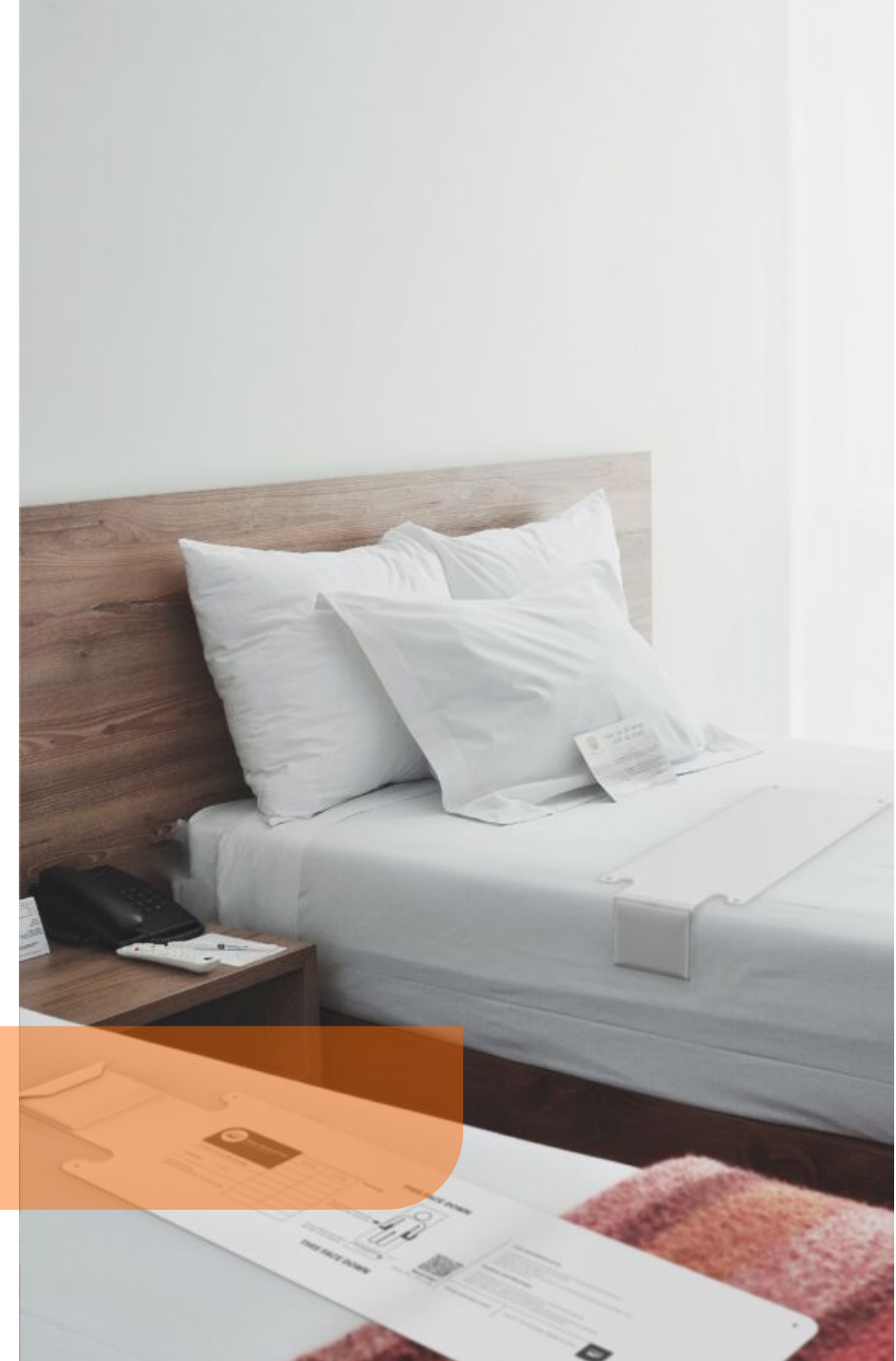


Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

[Sit/Sleep Advanced

Oedi Absenoldeb

Ar ôl i'r moddau / opsiynau gael eu rhaglennu, trowch y deial i'r rhif a ddymunir sy'n cyfateb i'r amser oedi sy'n ofynnol. Nid oes angen pwysu a dal y switsh mewnol wedyn. Yr opsiynau oedi absenoldeb yw:

- 0 – 0.5 Eiliad
- 1 – 3 Eiliad
- 2 – 5 Eiliad
- 3 – 20 Eiliad
- 4 – 1 Munud
- 5 – 5 Munud
- 6 – 15 Munud
- 7 – 30 Munud
- 8 – 45 Munud
- 9 – 60 Munud

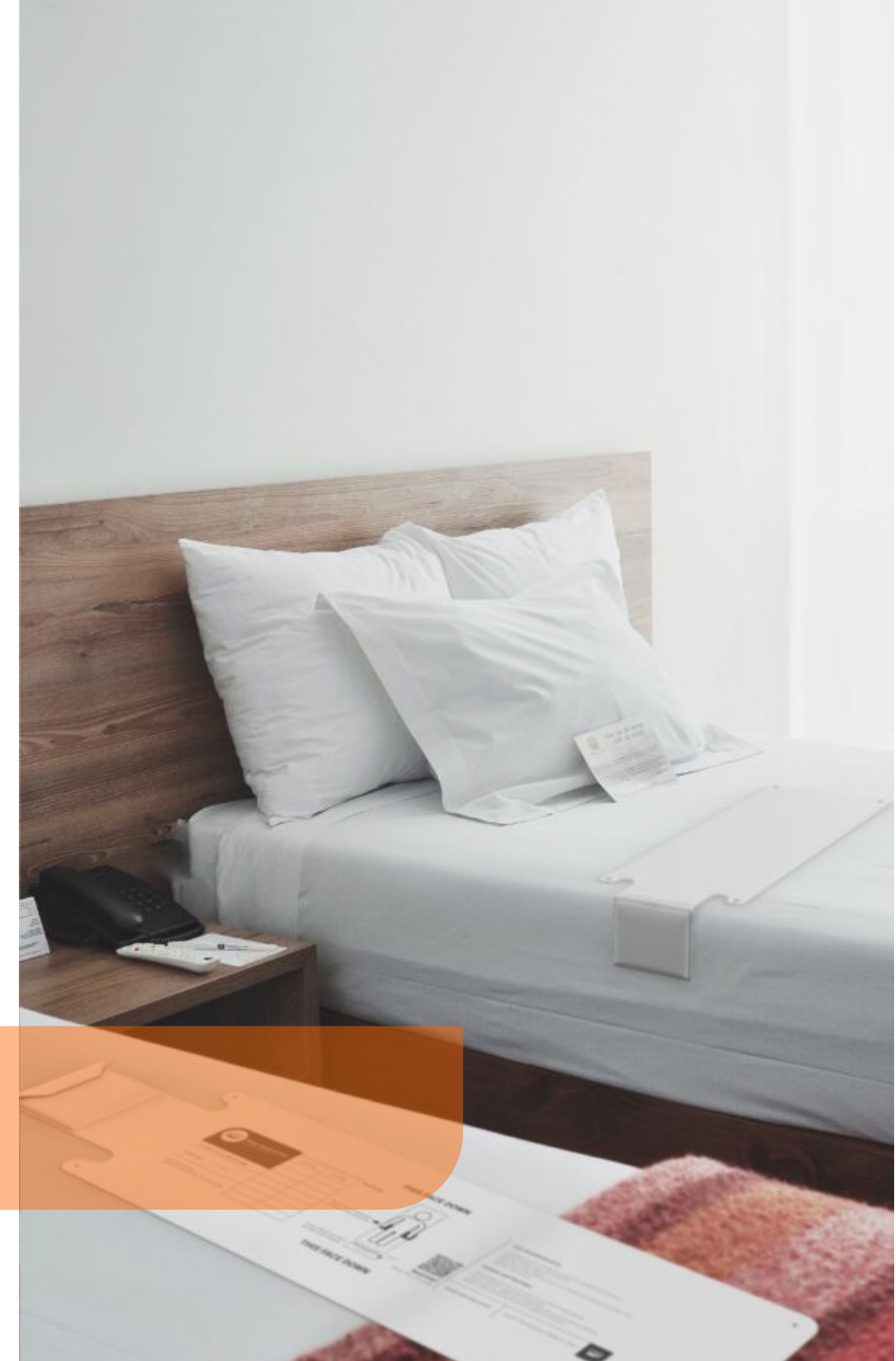


Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

[Sit/Sleep Advanced

Aseinio i Notifier / System Arall

- Rhaglennu'r Detect Mini i Fodd 1 neu 2
- Eisteddwch ar y pad
- Paratowch y Notifier/system arall i fodd cofrestru
- Actifadu'r Detect Mini wrth adael y pad
- Mi ddylai'r Notifier/system arall nawr cydnabod y ddyfais newydd

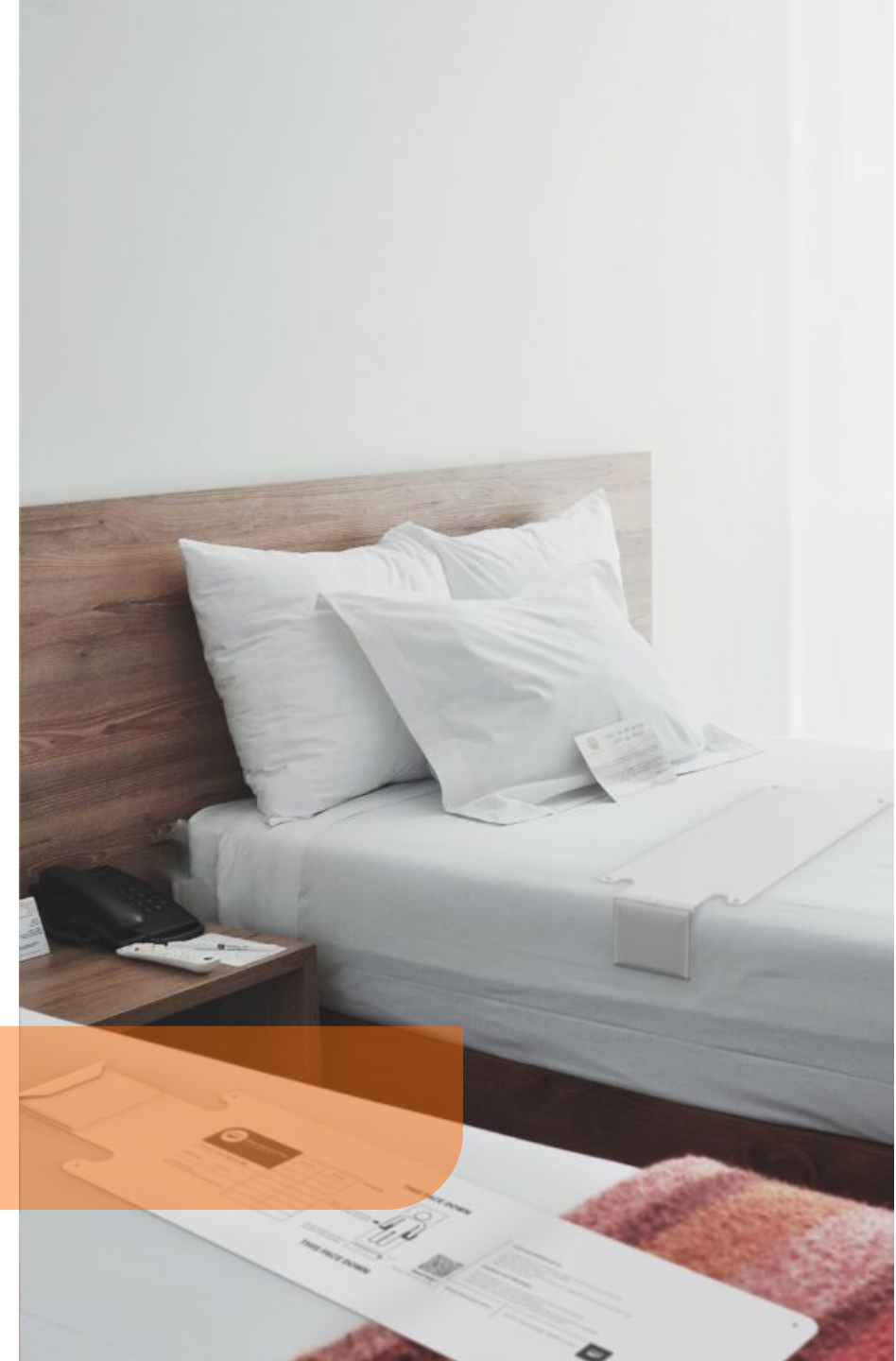

Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Diolch



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

www.we-cair.com

01422 399155 | hello@we-cair.com